

CONECTAR SOUND ASSIST A TUS AUDÍFONOS

Widex Sound Assist debe enlazarse con sus audífonos antes de enlazarlo con otros dispositivos, como un teléfono inteligente o una computadora.

- Asegúrese de que Widex Sound Assist esté apagado y reinicie sus audífonos. Los audífonos permanecen en modo de emparejamiento durante 3 minutos.
- En Widex Sound Assist, mantenga presionado el botón para subir el volumen (3) y el botón de encendido/modo (6) durante 3 segundos hasta que la luz (1) se vuelva azul.
- Mantenga ambos dispositivos a menos de 1 metro de distancia entre sí.
- La secuencia de emparejamiento comenzará automáticamente y la luz (1) parpadeará brevemente en verde cuando el emparejamiento se haya completado con éxito.

Widex Sound Assist solo se puede sincronizar con un juego de audífonos. Para emparejar un nuevo conjunto de audífonos, debe realizar los mismos pasos y el nuevo emparejamiento sobrescribirá al existente.

EMPAREJAMIENTO CON DISPOSITIVO SECUNDARIO:

En Widex Sound Assist, mantenga presionado el botón de aumento de volumen (3) y el botón de encendido/modo (6) durante 3 segundos hasta que la luz (1) se vuelva azul

- Mantenga ambos dispositivos a menos de 1 metro de distancia entre sí.
- La secuencia de emparejamiento comenzará automáticamente y la luz (1) parpadeará probablemente en verde cuando el emparejamiento se haya completado con éxito.

Widex Sound Assist puede emparejarse con hasta 8 dispositivos Bluetooth y conectarse activamente a 1 dispositivo Bluetooth.

WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER



Widex es una marca registrada de WIDEX A/S.
Impreso por Rosendahls a/s. 2022-11. 9 502 5975 001 #02

Apple y el logotipo de Apple son marcas registradas de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países.
App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Android, Google Play y el logotipo de Google Play son marcas registradas de Google Inc.

Sujeto a cambios sin previo aviso.



GUÍA RÁPIDA

WIDEX SOUND ASSIST Accesorio multifuncional

WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER

CONOCIENDO TU SOUND ASSIST

Widex Sound Assist es una 'navaja suiza' para sus audífonos que caben en la palma de su mano. Puede ser un micrófono de mesa, utilizado como micrófono remoto para conversaciones uno a uno, manejar llamadas manos libres, transmitir desde una fuente digital y analógica, e incluso ser un control remoto para ajustar la configuración de su audífono. Widex Sound Assist también ofrece el modo Telecoil, lo que brinda al usuario el beneficio de transmitir audio de telebobina.



GUÍA RÁPIDA

Encendido y apagado del Sound Assist

Mantenga presionado el botón de encendido/modo (6) durante 2 segundos.

Cambiar el modo de funcionamiento

- Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- Presione el botón de encendido/modo (6) brevemente para alternar entre los modos del dispositivo.
- Las luces en el dispositivo mostrarán el modo operativo seleccionado.



El modo de funcionamiento actual se muestra mediante los tres indicadores luminosos de modo (6).

Ajuste del volumen de transmisión

Presione brevemente el botón para subir el volumen (3) o el botón para bajar el volumen (4) para ajustar el nivel de sonido.

Uso de Widex Sound Assist

Use el clip de metal integrado (8) o el lazo para el cuello incluido.

Botones de bloqueo para evitar el uso no deseado

- Presione el botón de subir volumen (3) y el botón de programa (5) simultáneamente para bloquear y desbloquear los botones.

- Los indicadores luminosos en uso (1) parpadean en blanco dos veces para indicar que los botones se han bloqueado o desbloqueado..

Recarga

Use el cable micro-USB incluido para cargar su Widex Sound Assist. Una carga completa requiere 3 horas de carga.

MICRÓFONO REMOTO

Micrófono asociado

- Cuando un solo hablante está usando Sound Assist, el dispositivo transmite automáticamente la voz de la persona con la que está hablando al audífono.

Micrófono de mesa

- Presione el botón de encendido/modo (6) brevemente para seleccionar el modo Micrófono de mesa (icono de micrófono) (7).

- Cuando el indicador luminoso del micrófono (7) está verde, el modo Micrófono de mesa está activo.

- El mejor resultado se obtiene cuando Widex Sound Assist se coloca sobre una superficie plana.

Si desea enfocarse en una persona en particular, puede bloquear la dirección de escucha y apuntar manualmente a la persona en la que desea enfocarse.

- Presione y mantenga presionado el botón (2) hasta que el indicador luminoso superior (1) se ilumine en verde fijo.
- Apunte Widex Sound Assist hacia la persona enfocada.
- Pulse y mantenga pulsado el botón (2) de nuevo para desbloquear la dirección de escucha.

Cancelación acústica

Silencio durante la transmisión. Los micrófonos de los audífonos aíslan el ruido del entorno.

- Mantenga presionado el botón para bajar el volumen (4) durante un mínimo de 3 segundos para silenciar los micrófonos de los audífonos.
- Mantenga presionado el botón para subir el volumen (3) para activar los micrófonos de los audífonos.

TRANSMISIÓN BLUETOOTH

- Presione el botón de encendido/modo (6) brevemente para seleccionar el modo Bluetooth (icono de Bluetooth) (7).

- Cuando el indicador luminoso de Bluetooth (7) está verde, el modo Bluetooth está activo.

Llamadas telefónicas manos libres

Acepte o rechace sus llamadas telefónicas con Widex Sound Assist, transmitiendo la llamada desde cualquier teléfono inteligente directamente a su audífono.

LLAMADAS ENTRANTES

Contestar Pulse brevemente el pulsador (2) para aceptar la llamada.

Colgar Pulse brevemente el pulsador (2).

Rechazar Mantenga presionado el botón (2) brevemente durante 2 segundos.

LLAMADAS SALIENTES

Llamar Inicie la llamada en el teléfono conectado o haga una solicitud a través del asistente de voz del teléfono. Una vez conectado, hable al micrófono de Widex Sound Assist.

Usar asistente de voz

- Asegúrese de que Widex Sound Assist esté conectado a un dispositivo Bluetooth con Voice Assistant activado.
- Mantenga presionado el botón (2) durante 2 segundos y haga su comando de voz.

Transmisión auditiva

Transmita audio desde cualquier dispositivo Bluetooth a su audífono. Seleccione Widex Sound Assist en el menú Bluetooth de su dispositivo o ponga ambos dispositivos en modo de emparejamiento para permitir el enlace.v

Reproducir/pausa Pulse brevemente el pulsador (2).

Siguiente pista Pulse el pulsador (2) dos veces.

Rechazar Presione el pulsador (2) tres veces

Control Remoto

Cuando no se usa para la transmisión, Sound Assist se puede usar como un control remoto para sus audífonos, cambiando los programas y el nivel de volumen.

Para activar el control remoto, primero seleccione el modo Bluetooth.

Cambiar Programas Presione el botón de programa (5) brevemente para cambiar el programa en su audífono.

Si su audífono está programado con el programa Zen+, puede acceder a él presionando prolongadamente el botón de programa (5). Las pulsaciones breves del botón de programa (5) le permitirán elegir entre los estilos Zen disponibles.

Ajustar el sonido Presione brevemente el botón para subir el volumen (3) para subir el volumen y presione brevemente el botón para bajar el volumen (4) para bajar el volumen.



TRANSMISIÓN TELECOIL

Widex Sound Assist en modo Telebobina transmitirá sonido desde cualquier Telebobina cercana.

- Presione el botón de encendido/modo (6) brevemente para seleccionar el ícono T.
- Cuando el indicador de luz T (7) está verde, el modo Telebobina está activo.
- Para reproducir o detener la transmisión de Telecoil, presione brevemente el botón (2).